


DEEPBLUE Covid-19 Antigen Rapid Test – Selbsttest CE1434

zum qualitativen Nachweis von Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE1434 zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

1 Test/Kit – Karton: VPE: 400 Test Kits

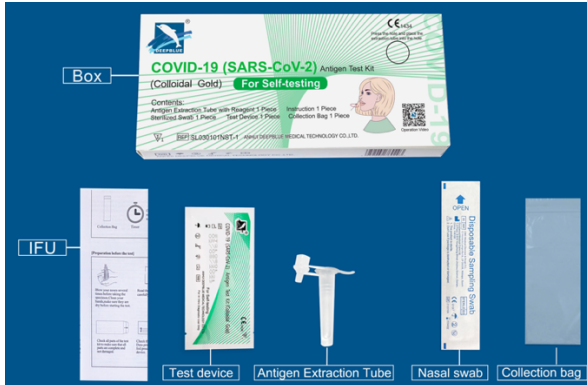

1 Test/Kit – Softpack: VPE: 1.000 Test Kits



5 Tests/Kit – Karton: VPE: 250 5er Packs = 1.000 Tests



Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. vorgefüllter Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Gebrauchsanweisung
5. Biosicherheitsbeutel

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Anterior-nasal (kurze Nase!) Test
- Spezifität: 99,8 %, Sensitivität: 96,4%
- Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

DEEPBLUE COVID-19 Antigen Rapid Test: 1er Faltschachtel und 5er Faltschachtel / 1er Softpack

DEEPBLUE COVID-19 Antigen Rapid Test CE1434	CE zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung	anterior-nasale („kurze Nase“) Proben	<u>Leistungsmerkmale:</u> Spezifität: 99,8 % Sensitivität: 96,4%	<u>Ergebnis:</u> in 15 Minuten <u>Haltbarkeit:</u> 24 Monate	<u>PZN 1er:</u> 5920136 <u>PZN 5er:</u> 5920142	<u>Lagerung:</u> Vor Sonnenlicht schützen / 2°- 30°C
<u>1er Karton-Pack:</u> 500 Packs/Karton <u>5er Karton-Pack:</u> 200 5er Packs/# = 1.000 Tests	<u>EAN Code 1er:</u> 6952062772217 <u>EAN Code 5er:</u> 6952062772194	<u>1er Karton-Maße:</u> 59,5 x 49,5 x 35 cm <u>5er Karton-Maße:</u> 62 x 54 x 38 cm	<u>1er Gewicht/Karton:</u> 14,5 KG <u>5er Gewicht/Karton:</u> 18,5 KG	<u>Europalette 1er:</u> 6 Transportkartons = 3.000 Tests 4 Transportkartons = 4.000 Tests	<u>1er Softpack:</u> Inhalt: 1000 Tests 4.000 Tests/EPAL <u>EAN Code:</u> 6952062770046	<u>Hersteller:</u> Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd., 230088 Hefei, Anhui, China

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203